

BODY EVOLUTION

TECN★STAR
ESTETICA AVANZATA

NASCE IL NUOVO METODO DI LAVORO
SEMPRE PIU' AVANZATO PER UN
CORPO ARMONIOSO



BODY EVOLUTION

rappresenta il nuovo metodo di lavoro altamente performante, per il trattamento a 360° di tutti gli inestetismi del corpo.

Sette tecnologie di ultimissima generazione con due soli manipoli con la possibilità di applicazione singola o sinergica.





- **Vacuum:** tecnologia non invasiva che sfrutta la metodica della suzione e del rilascio per eseguire uno scollamento del connettivo e ossigenare il tessuto.
- **Bioimpulso:** generatore di corrente con una forma d'onda triangolare che favorisce la contrazione delle fibre muscolari con conseguente turgore e trofismo al tessuto cutaneo.
- **Cromoled:** Luce fredda Rossa per il miglioramento dell'idratazione della pelle e la stimolazione delle fibre reticolari.
- **Bioveicolazione:** Onde armoniche elettriche modulate, per la penetrazione delle sostanze funzionali in loco.
- **Onda Lipidica:** Movimento meccanico non invasivo per la riduzione degli inestetismi da adipe e cellulite allo stadio finale.
- **Infrared:** luce non visibile con azione termica volta a stimolare l'attività di lipolisi e di riduzione del pannicolo adiposo.
- **Dermostimolazione:** energia elettromagnetica ad azione diatermica, la quale favorisce la stimolazione di neo collagene, conferendo turgore al tessuto.





DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50-60 Hz

Fusibili: 2x5 Amp T 250 V

Dimensione e Peso:

- Modulo comando: 37x42x40 cm – 21 kg
- Base: 37x42x85 cm – 25 kg (opzionale)
- Display: LCD Color 8" 800X600 pixels

Tipo di Apparato: Classe BF

Interfaccia Utente: "Touch Screen Display"

USB: Solo per aggiornamento software/firmware

FASE START

Pressione massima	-200 mbar
Tempo di suzione	Da 1 a 10 (ogni unità corrisponde a 0,5 ms)
Tempo di rilascio	Da 1 a 10 (ogni unità corrisponde a 0,5 ms)
Frequenza onda modulata	Da 1600 Hz a 2100 Hz
Tensione massima di uscita	120 Vac p-p
Corrente massima di uscita	1.5 mAmp/cq
Cromoled Attivante	Luce fredda color Rosso Lunghezza d'onda 635 nm Pot. Max uscita 4,4 mW/cq

FASE SCULPT

Frequenza onda modulata	Da 1600 Hz a 2100 Hz
Tensione massima di uscita	90 Vac p-p
Corrente massima di uscita	1.5 mAmp/cq
Frequenza di Emissione Manipolo	1 MHz +/- 10%
Modulazione	Sinusoidale: 40kHz
INFRARED	Lunghezza d'onda 940 nm Pot. Max uscita 400 mW

FASE TONE

Frequenza di uscita	455 KHz +/- 10% standard
Tensione massima in uscita	300 Vac p-p
Potenza R.F.	25 Watt
INFRARED	Lunghezza d'onda 940 nm Pot. Max uscita 400 mW

TECN STAR

www.tecnostaritalia.it

Via Orfeo, 32/2C, 40124 Bologna BO

info@tecnostaritalia.com

051 41 12 243